


GEBRAUCHSANLEITUNG

Uro-Tainer® Suby G / Uro-Tainer® Solutio R


VEREINFACHTE KATHETERPFLEGE

Uro-Tainer® ist ein steriles, gebrauchsfertiges Einmalsystem zur Katheterpflege. Es vermindert in erheblichem Masse die Kristallbildung, das Risiko von Harnwegsinfektionen und die Häufigkeit von Katheterwechseln. Der gesamte Vorgang erfolgt in einem geschlossenen Kreislauf, ohne dass Luft ein- oder austritt.

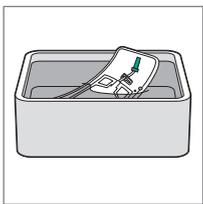


SCHRITT 1

Uro-Tainer® in lauwarmem Wasser auf Körpertemperatur erwärmen. Inzwischen sorgfältig Hände desinfizieren. Nach Möglichkeit Einweghandschuhe tragen.

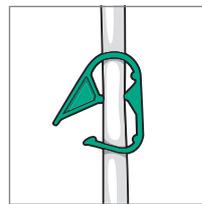


SCHRITT 5

Klemme öffnen und einige Tropfen der Uro-Tainer® Spüllösung in den Katheter fließen lassen, um allfällige Luftschlüsse zu entfernen.

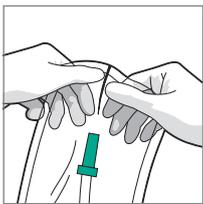


SCHRITT 2

Plastikhülle öffnen und Uro-Tainer® entnehmen.

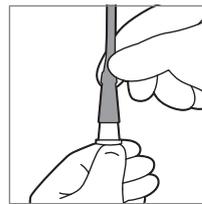

SCHRITT 6

Anschlusskonus in den Kathetertrichter einführen und Uro-Tainer® Spüllösung einfließen lassen. (wie in Schritt 7 beschrieben)

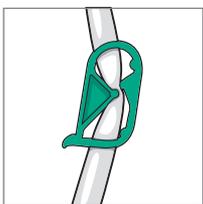


SCHRITT 3

Schlauch des Uro-Tainer® mit der Kunststoffklemme verschliessen.



SCHRITT 7

Uro-Tainer® über Blasenhöhe halten und Flüssigkeit mithilfe der Schwerkraft einlaufen lassen. Keinen Druck auf den Beutel ausüben. Kunststoffklemme schliessen. Beutel nicht vom Katheter lösen.

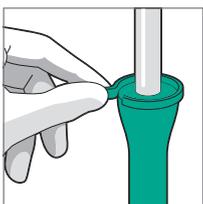

SCHRITT 4

Die Sicherheitsversiegelung von der Kappe abziehen. Kappe drehen und entfernen, ohne den sterilen Anschlusskonus zu berühren.



SCHRITT 8

Nach 5 Minuten die Klemme öffnen und den Uro-Tainer® unterhalb des Blasen-niveaus senken, damit die Flüssigkeit wieder zurück in den Beutel fliesst. Wenn der Beutel voll ist, Schlauch mit Klemme verschliessen und den Konnektor durch leichtes Drehen vom Katheter lösen. Drainagebeutel an den Katheter anschliessen und Uro-Tainer® nach Gebrauch entsorgen. Hände desinfizieren. Uro-Tainer® nur zum einmaligen Gebrauch verwenden.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen sowie mögliche Nebenwirkungen in den Benutzerinformationen.